

Návod k použití

MIRUS™ KOŽNÍ STAPLER

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE.

DŮLEŽITÉ

Tato brožura je určena k tomu, aby Vám pomohla s užitím Mirus™ Kožního Stapleru. Nepojednává o chirurgických metodách staplingu. Mirus™ Kožní Stapler byl navržen, testován a vyroben pouze pro jedno použití.

INDIKACE

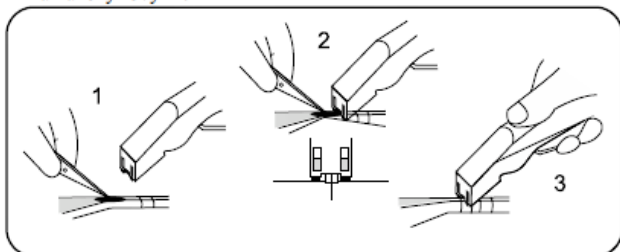
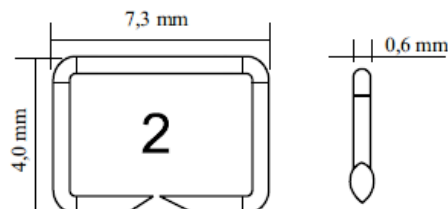
Mirus™ Kožní Stapler se aplikuje v břišní, gynekologické, ortopedické a hrudní chirurgii za účelem uzavření kůže. Také může být používán pro další spektrum kožního šití.

ÚČINNOST

Každá jednotlivá svorka je umístěna v momentě, kdy je stisknuta rukojeť Mirus™ Kožního Stapleru. Svorky proniknou skrze kůži a následně se zformují do tvaru obdélníku.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro uzavření kůže použijte ozubené kleště nebo zařízení pro přibližování tkáně a přidržeťte okraje kůže rovnoměrně blízko u sebe.
2. Umístěte středovou značku uprostřed obou okrajů kůže.
3. Stiskněte rukojeť až na doraz. Neúplné stisknutí rukojeti může způsobit neúplné vytvarování svorky nebo nesprávné sešití. Opakujte výše uvedené kroky při udržování stejné vzdálenosti mezi oběma svorkami, dokud nebude řez uzavřen. Nesprávně vytvarované svorky by měly být nahrazeny novými.

**Rozměry svorky:****BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ**

1. Čtěte instrukce pro použití.
2. Toto zařízení je sterilní a pouze pro jedno použití. Neužívejte, bylo-li balení již otevřeno nebo je-li narušeno. Nesterilizujte. Po použití vyhoďte.
3. Vždy se ujistěte, že je spoušť zcela uzavřená a že se uvolňuje tak, aby správně vložila další svorku na její pozici.

Hlavní součásti:

Svorka: 316L nerezová svorka

Rukojeť: ABS

Patrona: ABS

Naváděcí zařízení: nerezová ocel

Obal jednotky: papír DUPONT Tyvek

RIZIKO OPAKOVANÉHO POUŽITÍ

Tento výrobek je určen pouze pro jedno použití. Je-li užíván vícekrát, může dojít k přenosu nákazy / infekci nebo nemusí splnit svůj účel. Instrukce pro jedno použití jsou tudíž zmíněny na obalu a rovněž v návodu pro použití.

Symboly používané při označování

	Označení CE a identifikační číslo správního orgánu, který byl uvědoměn		Nepoužívejte opakovaně
	Upozornění		Neprovádějte opakovanou sterilizaci
	Udržujte v suchu		Použijte do
	Chraňte před slunečním světlem		Kód šarže
	Nepoužívejte, pokud je balení poškozené		Sterilováno s použitím etylénoxidu
	Výrobce		Teplotní omezení
	Přečtěte si návod k použití		Datum výroby
	Obsah		Autorizovaný zástupce v Evropském společenství